



3・4・5才

上下印象(硬石膏)・バイト
(下顎の印象のみでも可)

6才以上

上下印象(硬石膏)
安静位のバイト

アイルデンタルに郵送

模型・バイト・発注書を送付

10日

装置到着

郵送時の破損のチェック

V キッズ開始

注意事項・お手入れの指導
(取り扱い説明書を渡す)

2週間後チェック

装着状況をチェック

経過チェック

3・4才は2か月に1回
5才は1ヶ月に1回

使用期間

3・4才 2年
5才 1年

経過チェック

1ヶ月に1回

使用期間6か月

矯正の前の使用に限る

発注からセットまでの
予約は2週間以上空け
ないようにアポイント
を取りましょう。

2週間後チェックと、
1ヶ月後の経過チェッ
クのアポイントをとり
ましょう。

保護者の方へ

小児口腔機能育成装置 V キッズについて



V キッズの流れ

クリニックによって異なることがあります



V キッズとは

育成装置としての2つの特徴と役割



開始年齢

スタート時の年齢によって使用が変わります

3. 4. 5才

- ・ 使用期間 2 年

6 才以上

- ・ 使用期間 6 か月
- ・ 矯正手段の前に使用